

Neuen Zyklus anlegen

● gedrückt halten + ► bis 04 o.ä.

auf Piepton warten und ● solange gedrückt halten.

LH pos. oder St Schleim

● → „01“ → + ●

beide gedrückt halten bis „CY“ kommt,

dann ● loslassen und ● solange drücken bis es piept.

Datenübertragung Zyklussoftware

USB Kabel an PC dann erst an das Gerät

● drücken + sofort danach ●
solange gedrückt halten bis „USB“

Software starten und Daten einlesen.